

motif
MEDICAL



Motif RoamTM Manual de Instrucciones

1. Introducción

Conozca el Motif Roam™

Presentamos Motif Roam™, nuestro sacaleches duradero y flexible diseñado para mamás ocupadas. Con modos especializados desarrollados por profesionales de la lactancia, le ayuda en su experiencia única de extracción. Compacto y portátil, el Roam es perfecto para extraer leche en cualquier momento y lugar.

Todos los productos de Motif Medical® adquiridos a través de distribuidores autorizados cuentan con una garantía del fabricante que establece que el producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante 2 años para los sacaleches, durante 1 año para las baterías internas y durante 90 días para las piezas del sacaleches.

Asegúrese de registrar su sacaleches en cuanto lo reciba:
motifmedical.com/warranty-registration/



Índice

1.	Introducción	2
2.	Características principales	7
3.	Uso previsto (indicaciones de uso)	8
4.	Símbolos	9
5.	Seguridad	11
5.1	Prohibiciones, advertencias y precauciones	11
6.	Piezas	14
6.1	Qué incluye	14
6.2	Botones y funciones	16
6.3	Información sobre la batería	18
6.4	Ajustes y modos	19
7.	Esterilización y limpieza	21
8.	Funcionamiento de su sacaleches	24
8.1	Talle del protector mamario	24
8.2	Montaje de las copas de recogida	27
8.3	Encendido y apagado del sacalechesMotif Roam™	28

9.	Uso del sacaleches Motif Roam™	29
9.1	Guía de extracción	29
9.2	Preparándose para extraer	29
9.3	Alineación del protector mamario	30
9.4	Extracción de la leche	31
9.5	Después de la extracción	33
9.6	Conservación de la leche materna	34
10.	Solución de problemas	36
10.1	Solución de problemas	36
10.2	Eliminación	38
10.3	Cuándo sustituir las piezas	39
11.	Información técnica	41
12.	Garantía	42



2. Destacados

Compacto y portátil, el Roam es perfecto para las mamás que se desplazan. Fabricado pensando en la durabilidad, puede soportar las exigencias de la extracción diaria a la vez que le proporciona la flexibilidad que necesita para extraerse leche cuando y donde la vida la lleve.

Nuevos modos de extracción

Incluye dos modos personalizados, diseñados por un profesional de la lactancia, para maximizar la recogida de leche y minimizar el tiempo dedicado a ajustar la configuración del extractor.

Copas de recogida

Copas ultraligeras, discretas y a prueba de pérdidas de 5 oz, diseñadas para adaptarse cómodamente a su sujetador.

Superligero

Pesa menos de una libra para una portabilidad perfecta.

Pantalla LCD retroiluminada

Pantalla fácil de leer que no cansa la vista.

Batería recargable

Con una duración de la batería de 120 minutos entre cargas, el Motif Roam es portátil, lo que facilita su uso mientras se extrae leche sobre la marcha.

Manos libres

Utilice el cordón desmontable incluido para colgarse el extractor del cuello y tener las manos libres para extraer leche.

Sistema cerrado

La protección contra reflujo mantiene limpio el motor, evitando la contaminación.

Motor silencioso

Un zumbido bajo que no despertará a su bebé.

3. Uso previsto (Indicaciones de uso)

El sacaleches Motif Roam™ está destinado a mujeres en periodo de lactancia para extraer y recoger leche materna. El Motif Roam™ puede utilizarse como extractor simple o doble y sólo está destinado al uso personal.

Lea este documento en su totalidad y siga las instrucciones al pie de la letra. Para evitar daños personales y materiales, tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad contenidas en este documento.



Advertencia: Para evitar: Para evitar lesiones leves

- Compartir un sacaleches puede provocar riesgos para la salud y anular la garantía del fabricante.

4. Símbolos



Advertencia: Situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones graves.



Precaución: Situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales leves.



Aviso: Información útil o información que usted debe conocer al utilizar este producto



Fabricante



Fecha del fabricante



Número de serie



Número de catálogo del fabricante



Consulte el manual de instrucciones

IP22 Protección de entrada



Estado de la batería



DC



Transporte/Humedad de almacenamiento



Humedad de funcionamiento



Temperatura de funcionamiento



Temperatura de almacenamiento



Presión de funcionamiento



Transporte/Almacenamiento presión

4. SYMBOLS



Frágil



No amontonar



Hacia arriba



Mantener seco



Logotipo de buenas prácticas de fabricación



Pieza aplicada tipo BF (Lactancia materna)



Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación



Potencia



Aumenta el nivel de succión



Disminuye el nivel de succión



Botón de modo

5. Seguridad

5.1 Prohibiciones, advertencias y precauciones



Advertencia: Para evitar anulación de la garantía

- No modificar este equipo sin autorización del fabricante.
- No desmontar ni modificar el producto. El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- El uso de adaptadores de corriente distintos a los especificados en este manual del usuario puede causar daños internos en la bomba o hacer que ésta funcione incorrectamente. Por lo tanto, el uso de otros adaptadores de corriente anulará la garantía de su Motif.



Warning: To reduce the risk of electrocution

- Desenchúfelo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
- No lo utilice durante el baño.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No tome el producto si se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.



Warning: To avoid fire, electrocution, or serious burns

- No deje el producto desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto se utilice cerca de niños o personas con discapacidad.
- Coloque el producto fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice nunca este producto si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o sumergido en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

- No lo utilice nunca mientras duerme o está somnolienta.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
- No lo utilice al aire libre ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) en los que se administre oxígeno.
- Inspeccione siempre los cables del adaptador de corriente antes de utilizarlo para detectar daños o cables expuestos. Si detecta algún daño, deje de utilizar inmediatamente el adaptador de corriente y llame al servicio de atención al cliente de Motif Medical®.
- El Motif Medical® Twist no debe colocarse de forma que resulte difícil accionar el adaptador de corriente.



Advertencia: Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones

- Si usted es madre y está infectada por la hepatitis B, la hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
- Antes de cada uso, inspeccione visualmente los componentes individuales en busca de grietas, astillas, roturas, decoloración o deterioro. En caso de que se observen daños en el aparato, deje de utilizarlo hasta que se hayan sustituido las piezas.
- Este producto está destinado a ser utilizado por un único usuario y no debe compartirse entre usuarios.
- No conduzca mientras extrae leche.
- No lo utilice nunca durante el embarazo, ya que el bombeo puede inducir el parto.
- Limpie y desinfecte todas las piezas que entran en contacto con el pecho y la leche materna antes del primer uso.
- Lave todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- No continúe extrayéndose leche durante más de 2 sesiones consecutivas si no obtiene resultados.
- No descongele la leche materna congelada en el microondas ni en un recipiente con agua hirviendo.
- Si el tubo se enmohece, deje de utilizarlo y sustitúyalo por uno nuevo.
- Si se produce una acumulación de leche materna, debe limpiar los tubos antes de la siguiente sesión de extracción.



Precaución: Para evitar lesiones leves

- No enrolle el cable alrededor del cuerpo del adaptador de corriente.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el sacaleches.
- Extraiga sólo con el sacaleches en posición vertical.
- No acorte el tubo.
- Asegúrese de que el voltaje del adaptador de corriente es compatible con la fuente de alimentación.
- Enchufe primero el adaptador de corriente al sacaleches y después a la toma de corriente.
- No utilice limpiadores/detergentes antibacterianos o abrasivos para limpiar el sacaleches o sus piezas.
- No introduzca nunca el motor del sacaleches en agua o en un esterilizador, ya que puede causar daños permanentes al sacaleches.
- No intente retirar el protector mamario mientras se extrae leche. Apague el sacaleches, rompa el sello entre el pecho y el protector con el dedo, y luego retírelo del pecho.
- Si la extracción le resulta incómoda o le causa dolor, apague el aparato, rompa el sello entre el pecho y el protector mamario con el dedo y retire el protector del pecho.
- Las piezas del sacaleches se vuelven quebradizas cuando se congelan y pueden romperse al caerse.
- Las piezas del sacaleches pueden dañarse si se manipulan incorrectamente, por ejemplo, si se caen, se aprietan en exceso o se golpean.
- Tenga cuidado al manipular las piezas del sacaleches.
- No utilice la leche materna si las piezas del sacaleches están dañadas.

6. Piezas

6.1 Qué incluye

i Al desembalar la caja, asegúrese de que se incluyen todos los componentes siguientes.

1 Motor del extractor de leche (1)

2 Tubos (2)

3 Conector de tubo (2)

4 Diafragma (2)

5 Copa de recogida (2)

6 Protector mamario (2)


7 Válvula (4)

8 Adaptador de corriente (1)

9 Insertos de brida (16 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm)

10 Cable de carga USB (1)

No aparece en la foto:
Cordón (1)

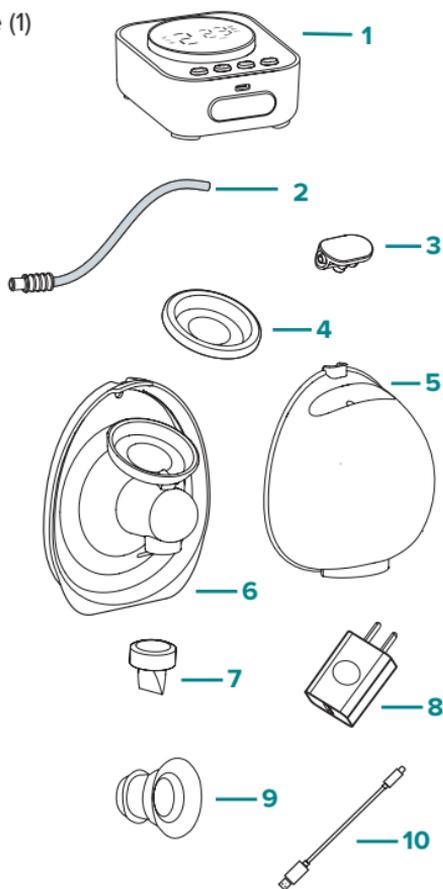

Accesorios y piezas adicionales disponibles para el sacaleches Motif Roam™:


- Kit completo de reabastecimiento con piezas de repuesto
- Piezas individuales
- Kit completo de reabastecimiento con botellas y bridas
- Insertos de brida: 13 mm, 15 mm
- Botellas de Motif Roam™
- Motif Roam™ Tetinas



Encuentre piezas de repuesto y suministros adicionales para el Motif Roam en:
motifmedical.com/replacement-supplies/

6.2 Botones y Funciones

PANTALLA LCD

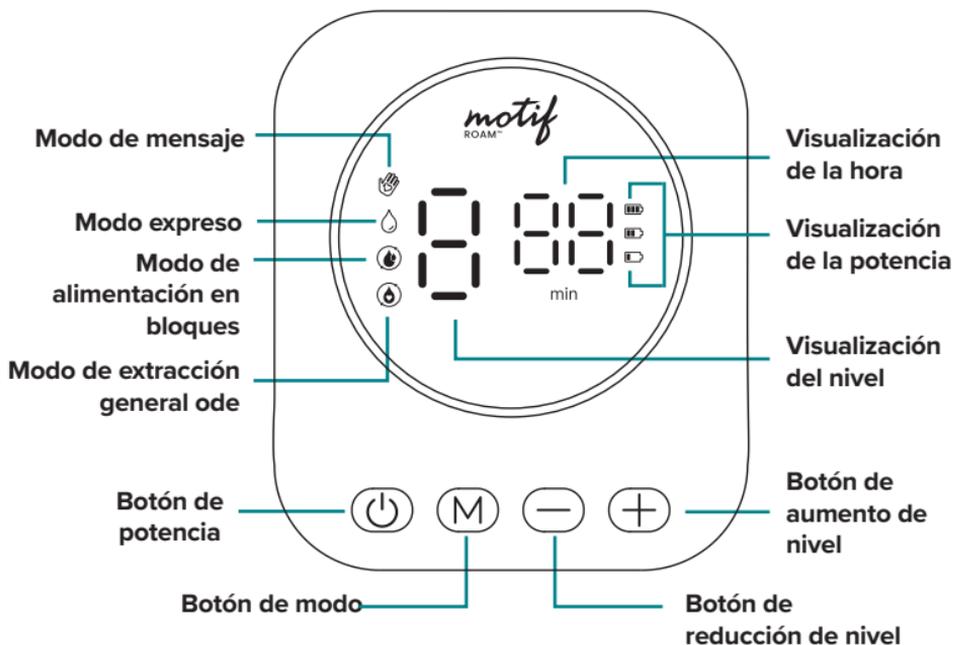

CONTROL DE BOTONES

Botón de potencia

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar la bomba.

Pulsación corta para pausar o desbloquear la bomba.

Botón de modo

Pulsación corta para cambiar entre los modos de bombeo.

Botón de aumento de nivel

Pulsación corta para aumentar el nivel de vacío (succión) durante cualquier modo.

Botón de reducción de nivel

Short press to decrease the vacuum (suction) level during any mode.

6.3 Información sobre la batería

DIFERENTES NIVELES DE CARGA



Batería baja



1/3 carga

*Conectar
pronto el cable
USB*



2/3 carga



**Carga
completa**

*Tiempo de
funcionamiento
aproximadamente:
120 min*



Cargue la batería tan pronto como quede un 0-30% de carga. Si la batería se agota, tu Motif Roam se apagará automáticamente. No utilices la bomba durante la carga.



Se recomienda cargar la bomba después de cada uso siempre que sea posible. Cargue su Motif Roam únicamente con el adaptador de corriente suministrado.

6.4 Ajustes y modos

Ajustes de succión

El nivel de succión de su extractor de leche se refiere a la fuerza de succión. Cuando utilice el Motif Roam™, normalmente comprobará que la extracción es más eficaz con el nivel de succión más alto con el que se sienta cómoda.

Es importante no ajustar el nivel de succión tan alto que te haga sentir incómoda, ya que el dolor resultante dificultará el flujo de leche.

El Motif Roam™ tiene 4 modos de bombeo. Los modos Masaje y Alimentación por grupos tienen 5 niveles. Los modos Expresión y Bombeo General tienen 9 niveles.

Modos estándar

Modos clásicos para una descarga y una extracción de leche eficaces.



Modo de masajes

Patrón de succión con ciclos rápidos y vacío bajo para ayudar con la extracción y para iniciar el flujo de leche.

- El modo de masaje tiene 5 niveles de succión



Modo expreso

Patrón de succión con ciclos más lentos y mayor vacío para extraer la leche con suavidad y eficacia.

- El modo expreso tiene 9 niveles de succión

Modos especializados

El Motif Roam™ incluye 2 modos diseñados con una consultora internacional de lactancia certificada (IBCLC).



Modo de alimentación en bloques

Modo de extracción de potencia mínima que imita la alimentación en bloques de un recién nacido para ayudar a aumentar la producción de leche. La lactancia en bloques se produce de forma natural cuando un bebé mama varias veces en un breve periodo de tiempo, realizando únicamente pausas rápidas, lo que indica al cuerpo que debe producir más leche. Dentro de cada nivel, este modo incluye 3 pasos de extracción con pausas de succión baja entre ellos.

- El modo de alimentación en bloques tiene 5 niveles de succión



Modo de extracción general

Modo de uso diario que comienza en modo de masaje y cambia a modo expreso al cabo de 2 minutos. Esto se repite dos veces para 2 extracciones.

Después de succionar con los modos de masaje estándar y expreso en este sacaleches, utilice el mismo nivel de modo expreso con el modo general de extracción para obtener la misma fuerza de succión.

- El modo general de extracción tiene 9 niveles de succión

7. Esterilización y limpieza

- i** Antes del primer uso, esterilice cada una de estas partes:
- Diafragma
 - Válvulas
 - Copa de recogida
 - Protector mamario
 - Insertos de brida

***No esterilice ni lave los tubos ni los conectores de los tubos.**

Repita la esterilización de las piezas enumeradas una vez al día después del uso de la bomba.

Instrucciones de esterilización

1. Si las piezas se han utilizado anteriormente, siga primero las instrucciones de limpieza.
2. Coloque las piezas de su copa de recogida en una olla y cúbralas con agua.
3. Lleve el agua a ebullición y deje hervir durante cinco minutos.
4. Retire las piezas con pinzas limpias.
5. Coloque las piezas de la copa de recogida sobre un papel limpio o un paño de cocina y deje que se sequen solas completamente.

- i** Las piezas también pueden esterilizarse en un esterilizador de vapor o en una bolsa de esterilización para microondas para esterilizar las copas de recogida de forma rápida y eficaz.

- i** Asegúrese de no introducir los tubos en las bolsas esterilizadoras para intentar limpiarlos.

Instrucciones de limpieza

1. Lávese bien las manos con agua caliente y jabón.
2. Desmunte todas las piezas de la copa de recogida que hayan estado en contacto con la leche materna. Esto incluye las válvulas, los diafragmas, los escudos, copas de recogida e insertos de brida. ***No limpie el tubo. Si hay humedad o leche en el tubo, sustitúyalo lo antes posible. Si necesita volver a utilizarlo, antes de sustituirlo lávelo y cuélguelo para que se seque. Asegúrese de que el tubo esté seco antes de utilizarlo. La humedad del tubo podría introducirse en la bomba y dañar el motor.**
3. Enjuague cada pieza con agua fría para eliminar los restos de leche.
4. Opciones de lavado de las piezas de la bomba:
 - Lave cada pieza por separado en el lavabo con un cepillo suave y jabón. (Asegúrese de utilizar un cepillo o paño nuevo exclusivamente para las piezas del sacaleches).
 - Sumerja cada pieza en agua tibia y jabón durante 5 minutos y, a continuación, enjuáguelas bien.
5. Seque cada pieza con una toalla limpia o deje que se seque completamente al aire sobre una superficie higiénica, como un papel limpio o un paño de cocina limpio. No seque con palmaditas.
6. Limpie el exterior del sacaleches con una toalla seca y limpia. ***No lave el exterior del sacaleches con agua ni moje el sacaleches cuando lo limpie.**



No se recomienda lavar y secar las piezas del sacaleches Motif en el lavavajillas. No existe una temperatura estándar para los lavavajillas y algunos pueden deformar las piezas. Las piezas dañadas en el lavavajillas no están cubiertas por la garantía.

Después de cada uso

1. Lávese bien las manos antes de manipular cada componente de la copa de recogida.
2. Desmunte todas las piezas que entran en contacto con la leche materna, como la válvula, el diafragma, el protector mamario, la copa de recogida y la brida.
3. Enjuague cada pieza en agua fría para eliminar los restos de leche.
4. Opciones de lavado de piezas individuales:
 - Lave cada parte por separado con un cepillo suave o un paño de cocina limpio.
 - Sumerja cada pieza en agua tibia y jabón durante 5 minutos y, a continuación, enjuáguelas bien.
5. Seque cada pieza con una toalla limpia y/o déjelas secar completamente al aire en una superficie higiénica.
6. Limpie el cuerpo principal con una toalla seca y limpia después de cada uso. *Nunca utilice agua para lavar el exterior del sacaleches.
7. Guarde las piezas después de que se sequen completamente en una bolsa o contenedor limpio. *No guarde las piezas húmedas.

8. Cómo utilizar el sacaleches

8.1 Tamaño del protector mamario

ENTENDER EL TAMAÑO

La extracción de leche no debe doler. Esta guía es un punto de partida para ayudarle a determinar el tamaño óptimo del protector mamario en función del diámetro de su pezón.


Cómo encontrar el protector mamario adecuado para usted

Paso 1

Utilizando una regla, una cinta métrica o una herramienta para medir bridas, mida el diámetro de la boquilla en la parte más ancha (normalmente la base) en milímetros (mm). Mida antes de extraer. **No incluya la areola.** Es importante medir ambos pezones, ya que pueden tener tamaños diferentes.

Paso 2

Sume 0-3 mm al tamaño de su pezón para determinar el tamaño de su protector mamario. Su pezón debe moverse con facilidad en el túnel del protector mamario y ninguna areola u otro tejido mamario debe entrar en el túnel del protector mamario. Puede que necesite probar más de una talla para encontrar el ajuste más cómodo y eficaz.

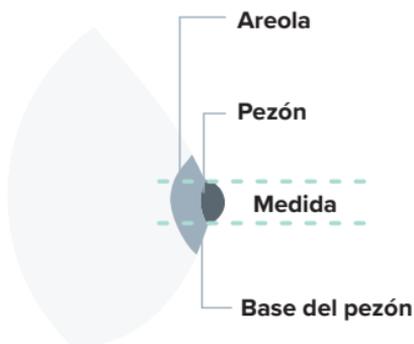


Ejemplo: Si el diámetro de su pezón mide 16 mm, la gama de tallas del protector mamario sería de 16 mm a 19 mm.

*1 cm = 10 mm


Consulte a continuación el tamaño recomendado del protector mamario en función de sus medidas. La mayoría de las madres consideran que añadiendo 0-3 mm a la medida de su pezón consiguen un ajuste cómodo y eficaz de la brida.

COMPRUEBE LA TALLA DE SU PROTECTOR MAMARIO

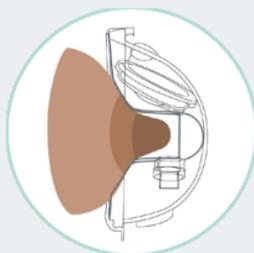

Buen tamaño

La extracción es cómoda y eficaz.

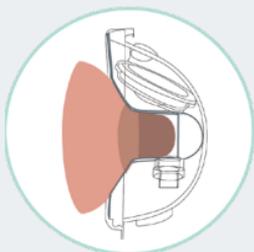


Demasiado pequeño

La extracción es dolorosa al rozar. Pruebe un tamaño más grande.


TABLA DE TAMAÑOS DE BRIDAS E INSERTOS

Brida	Se adapta a los pezones
13	10-13 mm
14	11-14 mm
15	12-15 mm
16	13-16 mm
17	14-17 mm
19	16-19 mm
21	18-21 mm
24	21-24 mm
27	24-27 mm
28	25-28 mm

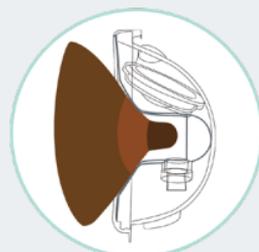

Demasiado grande

La areola está siendo introducida en el túnel de la brida. Solo la boquilla debe entrar en el túnel de la brida.

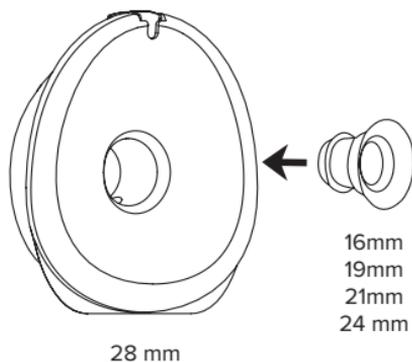

Tamaño de la brida

El protector mamario para las copas de recogida es de 28 mm. La caja también incluye insertos de bridas de 16 mm / 19 mm / 21 mm / 24 mm. Si es necesario, introduzca el inserto del tamaño correcto en el protector mamario para un ajuste más pequeño.

¿Debería probar un nuevo tamaño de protector mamario o de brida?

- ¿Su pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias?
- ¿Ve un exceso de areola dentro en el túnel?
- ¿Ve alguna rojez?
- ¿Se le está poniendo blanco el pezón o la areola?
- ¿Siente que la leche no fue extraída después de la succión?


Si ha respondido “Sí” a alguna de estas preguntas, considere la posibilidad de probar una nueva talla siguiendo las instrucciones de medición anteriores.

Si aún no está segura de haber elegido la talla correcta, acuda a un asesor en lactancia o a un especialista en lactancia materna para que le ayude a elegir el protector mamario del tamaño adecuado.


8.2 Montaje de las copas de recogida

Antes de utilizarlos, asegúrese de que sus manos y la copa de recogida están limpias.


1. Empuje el inserto de la brida en el protector mamario, si lo utiliza. El inserto debe quedar a ras del protector mamario.

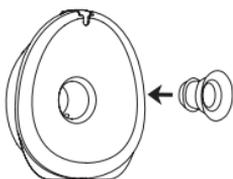


2. Introduzca la válvula de pico de pato de silicona en el protector mamario.

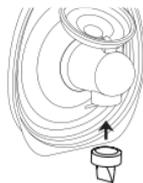


3. Coloque el diafragma en el protector mamario. Asegúrese de que está sellado alrededor del borde.

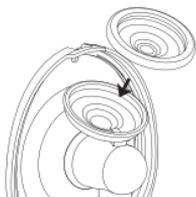

4. Introduzca la boquilla de la copa de recogida en el orificio situado en la parte superior del protector mamario. Empuje la copa de recogida en el protector mamario. Debe oírse un "clíc".

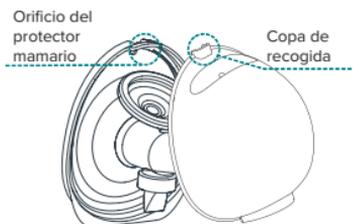

5. Inserte el tubo en el conector y conéctelo a la copa de recogida.

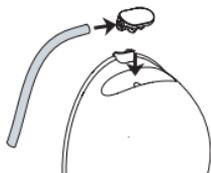

6. Inserte los tubos con conectores en uno o dos puertos de la bomba para realizar un bombeo simple o doble. Cuando bombee una sola vez, bloquee el otro puerto.



Bombeo simple



Bombeo doble

8.3 Encendido y apagado del sacaleches



Pulse el botón POWER

Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender la bomba. La pantalla se encenderá y la bomba comenzará en Modo Masaje en el nivel 1.



Pulse el botón MODE

Pulse el botón de modo para cambiar de modo



Ajuste el nivel de succión al nivel de comodidad preferido



Pulse el botón POWER

Cuando desee dejar de extraerse leche, pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar el extractor. Desconecte el tubo de la copa y retire la copa del pecho.



Cargue la batería inmediatamente cuando el símbolo de la batería parpadee en la pantalla.

Si el sacaleches permanece sin usar durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de utilizarlo. Desenchufe el adaptador de corriente del extractor de leche inmediatamente después de terminar de cargar el dispositivo.

9. Uso del sacaleches Motif Roam™

9.1 Guía de extracción



Aunque utilice el sacaleches, se recomienda dar el pecho al bebé siempre que pueda.

- Masajee suavemente sus pechos o aplique compresas calientes desde el pecho hacia el pezón antes de empezar la sesión de extracción.
- Extraiga leche de cada pecho durante 10 - 15 minutos. Se recomienda extraerse leche con frecuencia en lugar de hacerlo durante mucho tiempo. (Cada 2 - 3 horas, 8 veces al día).

9.2 Preparándose para extraer

1. Compruebe si está utilizando el protector o protector mamario del tamaño correcto. Consulte el apartado 8.1 para obtener más información.
2. Compruebe el nivel de la batería antes de utilizar la bomba para asegurarse de que está totalmente cargada.
3. Lávese bien las manos.
4. Compruebe si cada componente está desgastado o dañado antes de utilizarlo y sustituya las piezas cuando sea necesario.
5. Monte las copas de recogida y conéctelas al extractor de leche a través del tubo, tal como se describe en la sección 8.2 Montaje de las copas de recogida.
6. Asegúrese de que los tubos estén bien conectados para evitar fugas de aire.
7. Coloque las copas de recogida sobre el pecho por debajo del sujetador. Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para que la succión sea más cómoda.


9.3 Alineación del protector mamario

Centre el protector mamario en el pecho de modo que el pezón quede introducido en el túnel del protector.

Es importante que el protector mamario esté colocado correctamente antes de comenzar la extracción para evitar cualquier dolor que pueda producirse por el roce o la torsión del pezón en el lateral del protector. Si se extrae leche dos veces, coloque también el segundo protector.

Si le preocupa el ajuste o quiere asegurarse de haber colocado correctamente el protector mamario, consulte la sección 8.1 Talle del protector mamario.

Aunque es posible que sienta alguna molestia al utilizar un sacaleches por primera vez, el uso de un sacaleches no debe causar dolor. Si no está segura del tamaño del sacaleches, póngase en contacto con un profesional sanitario o un representante de Motif Medical® que pueda ayudarle a conseguir un ajuste adecuado.

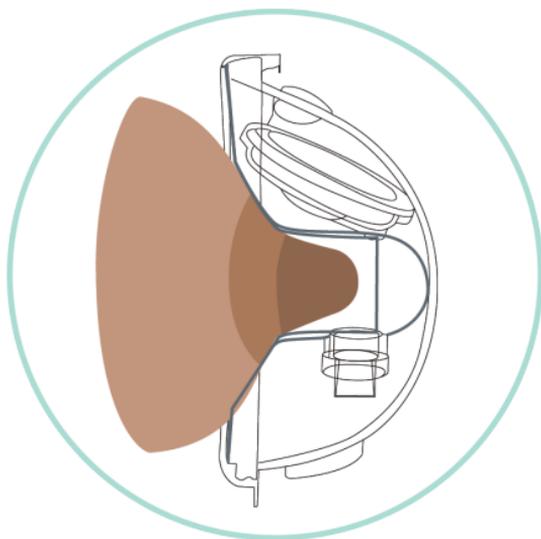

9.4 Extracción de la leche

1. Mantenga pulsado el botón de encendido  para iniciar la extracción. El extractor de leche comienza en modo masaje en el nivel 1.



2. Pulse el botón de Modo  para cambiar de modo. Hay cuatro opciones: Masaje , extracción , alimentación por bloques , y extracción general .



3. Ajuste la fuerza de succión pulsando el botón LEVEL UP (+) (AUMENTAR EL NIVEL) o LEVEL DOWN (-) (REDUCIR EL NIVEL) para encontrar un ajuste cómodo. Masaje y Alimentación en Bloques tienen 5 niveles, mientras que los modos Extracción y Extracción General tienen 9 niveles.



4. Cuando termine su sesión de extracción, pulse prolongadamente el botón (🔌) de encendido para apagar el sacaleches. Tenga en cuenta que el extractor se detendrá automáticamente transcurridos 30 minutos.



9.5 Después de la extracción

1. Después de la sesión de extracción, apague el sacaleches.
2. Retire con cuidado el conector del tubo de la copa mientras aún está en el sujetador.
3. Deslice un dedo entre su pecho y el protector mamario para separarlos. Retire la copa de recogida del sujetador, manteniéndola en posición vertical para evitar que se derrame la leche materna.
4. Con el protector mamario hacia arriba, vierta suavemente la leche en un biberón o copa de recogida a través de la boquilla de vertido situada en la parte superior del recipiente..

Después de cada sesión de extracción, asegúrese de desmontar el aparato. No intente nunca limpiar o esterilizar las piezas del extractor cuando aún estén montadas para asegurarse de que está limpiando y esterilizando bien cada pieza por separado.



No guarde la leche en la copa de recogida.



No enrolle el tubo alrededor del sacaleches para guardarlo.

9.6 Almacenamiento de la leche materna

- i** Cuando guarde la leche materna en una bolsa, asegúrese de utilizar únicamente rotuladores no tóxicos para escribir en ella.

		Ubicaciones/temperaturas de almacenamiento		
		Temperatura de la habitación 77°F (25°C) O más frío	Refrigerador 40°F (4°C)	Freezer 0°F (-18°C) más frío
Tipo de leche materna	Recién extraída o bombeada	0 - 4 horas	0 - 4 días	0 – 6 meses es mejor 6 – 12 meses es aceptable
	Descongelado (previamente congelada)	1-2 horas	0 - 24 horas (un día)	* Nunca volver a congelar leche humana luego de que ha sido descongelada
	Sobras de una toma (el bebé no se ha terminado el biberón)	0 - 2 horas luego de que el bebé haya terminado de alimentarse		

Source: CDC.gov

Cómo descongelar la leche materna

1. Asegúrese siempre de comprobar la fecha del envase de la leche antes de utilizarla. No utilice leche sin fecha, ni leche que haya estado almacenada más tiempo del recomendado.
2. Descongele la leche congelada en el refrigerador o bajo un chorro de agua fría.
3. Caliente la leche bajo un chorro de agua caliente y agite suavemente el recipiente para mezclar la leche. Asegúrese de no agitar el envase.
4. Si no se dispone de agua caliente, caliente una olla con agua en el fuego. Cuando el agua esté caliente, pero no hirviendo, retire el cazo del fuego y coloque el recipiente de la leche en él. Nunca caliente el recipiente directamente sobre el fuego.
5. Nunca cocine la leche materna en el microondas, ya que éste puede provocar puntos calientes peligrosos que podrían quemarla a usted o a su bebé.
6. Compruebe siempre la temperatura de la leche en el interior de su muñeca antes de dársela al bebé. La leche debe estar templada, no caliente.
7. Una vez descongelada, la leche debe conservarse en el refrigerador durante un máximo de 24 horas.
8. No vuelva a congelar la leche descongelada. Deseche la leche previamente congelada que no se utilice en 24 horas.

10. Solución de problemas

10.1 Solución de problemas

A continuación, encontrará condiciones generales que pueden ocurrir con su Motif Roam™ y las correspondientes soluciones.

Condición	Posibles causas	Comprobaciones	Soluciones
Sin energía	Adaptador de corriente	Compruebe si el cable de alimentación está desconectado o dañado.	Enchúfelo a la toma de corriente. Si presenta daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Motif en 844-272-8390 o donde adquirió el sacaleches.
Sin succión	Tubo	Compruebe que el tubo está conectado al cuerpo principal	Conecte el tubo al cuerpo principal.
	Válvula	Compruebe si la válvula está conectada adecuadamente al protector mamario.	Desmóntela y vuelva a montarla correctamente.
	Tapón del puerto de flujo de aire	Si el bombeo es simple, compruebe si el tapón del puerto de flujo de aire está cerrado.	Cierre el tapón del puerto de flujo de aire.
	Diafragma	Compruebe si el diafragma está atascado y no se suelta.	Baje el nivel de succión.
El cuerpo principal se moja		Desenchufe el adaptador de la toma de corriente. Apague el sacaleches. Limpie el cuerpo principal con un paño limpio y seco y guárdelo en un lugar cálido y seco durante unas 12 horas.	

Condición	Posibles causas	Comprobaciones	Soluciones
Pérdida de leche	Protector mamario	Compruebe si el protector mamario y la copa de recogida están conectados correctamente.	Desmóntelo y vuelva a montarlo correctamente.
Baja succión	Nivel de succión	Compruebe si hay un bajo nivel de vacío en la válvula reguladora de vacío o si hay un ruido anormal.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Motif en 844-272-8390.
	Kit de montaje defectuoso	Compruebe la conexión del kit.	Desmóntelo y vuelva a montarlo.
	Protector mamario	Compruebe si hay algún problema con el protector mamario.	Visite motifmedical.com
	Válvula	Compruebe si hay daños en la cabeza de la válvula.	Sustituya la válvula.
Dolor	Succión demasiado alta	Compruebe el nivel de succión.	Ajuste el nivel de succión más bajo y consulte a su especialista en lactancia o a su médico.
Leche materna en tubo		Apague el sacaleches. Desconecte el tubo del diafragma. Retire la leche y el tubo del diafragma.	



Si necesita ayuda adicional para solucionar problemas con su sacaleches, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Motif Medical®. Puede acceder a ellos en línea en motifmedical.com a través del chat, por correo electrónico en hello@motifmedical.com o por teléfono al (844) 272-8390.

10.2 Eliminación

Envíe los componentes que ya no utilice a Motif Medical® o deseche correctamente el dispositivo de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.



Como equipo eléctrico y electrónico, el dispositivo debe eliminarse de acuerdo con un procedimiento especializado para recogida, retiro y reciclado o destrucción de conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Consejo Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [RAEE].

10.3 Cuándo sustituir las piezas

La frecuencia con la que debe sustituir los suministros del sacaleches, como la copa de recogida, puede variar en función de la frecuencia con la que utilice el extractor. Por ejemplo, una madre que se extrae leche exclusivamente unas 9 veces al día y desinfecta sus piezas con más frecuencia que una madre que solo se extrae leche 3 o 4 veces al día necesitará sustituir sus piezas con más frecuencia.



Una buena referencia a tener en cuenta es sustituir las piezas cada 90 días.

Replacing your Tubing

Con el tiempo, el tubo se estira y se desgasta, lo que puede afectar a la fuerza de succión del sacaleches.

- Si el tubo se desliza fácilmente dentro y fuera del motor y del protector contra reflujo, entonces es hora de sustituirlo.
- También debe sustituir inmediatamente el tubo si entra humedad.
- No hay forma de esterilizar completamente los tubos para evitar que se acumulen bacterias en su interior, y la humedad podría dañar el motor del sacaleches.

Sustitución de las válvulas

Las válvulas de silicona deben sustituirse entre 1 y 3 meses en función de la frecuencia de uso, ya que pueden afectar a la potencia de succión.

- Es importante recordar que las piezas más pequeñas del sacaleches pueden no mostrar daños visibles.

Sustitución de los diafragmas

Los diafragmas pueden estirarse y perder elasticidad con el tiempo, lo que los hace menos eficaces para mantener la humedad fuera del motor del sacaleches.

- Deben sustituirse entre 3 y 6 meses en función del uso.
- Si observa algún desgarró, deformación, rasgadura o decoloración, es hora de sustituirlos.

Sustitución de los protectores mamarios (bridas) y las copas de recogida

Los protectores mamarios acumulan residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo, dependiendo de la frecuencia con la que se extraiga leche.

- Deben sustituirse cada 6 meses.
- No obstante, vigile si hay grietas, roturas o deformaciones, ya que podrían indicar que es necesario sustituirlo antes.
- La decoloración no afectará al funcionamiento de la bomba, pero puede resultar desagradable a la vista.

Sustitución de los insertos de silicona

Sus insertos de silicona acumularán residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo, dependiendo de la frecuencia con la que se extraiga leche.

- Deben sustituirse cada 6 meses.
- No obstante, vigile si hay grietas, roturas o deformaciones, ya que podrían indicar que es necesario sustituirlo antes.
- La decoloración no afectará al funcionamiento de la bomba, pero puede resultar desagradable a la vista.

11. Información técnica

Contenido	Descripción	
Tensión y frecuencia nominales	Entrada: 5V	
Batería / Vida útil	3.7 V, 3200 mAh, Li[on] 120 min.	
Protección contra descargas electrónicas	Clase II,  TIPO BF: Protector mamrío	
Grado de protección contra la penetración de agua	Clasificación IP: IP21	
Características generales de la extracción		
Modo de funcionamiento (funcionamiento continuo)	Modo expreso, modo de masaje, modo de alimentación en bloques, modo de extracción general	
Niveles de succión	Modo de masaje	1 - 5 Niveles
	Modo expreso	1 - 9 Niveles
	Modo de alimentación en bloques	1 - 5 Niveles
	Modo de extracción general	1 - 9 Niveles
Ciclos de succión	CPM fijo	
Función temporizador	Apagado automático (30 min ± 1 min)	
Ruido	≤55 dB	
Protección contra reflujo	Sí	
Condiciones de funcionamiento		
Temperatura ambiente	41 a 104°F	   Temperature Humidity Pressure
Humedad relativa	20 a 80%	
Presión del aire	85 a 106 kPa	
Condiciones de transporte y almacenamiento		
Temperatura ambiente	-4 a 131°F	   Temperature Humidity Pressure
Humedad relativa	20 a 80%	
Presión del aire	90 a 106 kPa	

11.1 Garantía

Asegúrese de registrar su sacaleches en cuanto lo reciba en: motifmedical.com/product-registration

Todos los productos Motif Medical® adquiridos en comercios autorizados tienen una garantía del fabricante que establece que el producto estará libre de defectos de fabricación y materiales durante 2 años para los sacaleches eléctricos dobles, durante 1 año para las baterías internas y durante 90 días para las piezas del sacaleches y el sacaleches manual.

La única obligación de Motif bajo esta garantía expresa será, a discreción de Motif, reemplazar o reparar el producto o pieza(s) del mismo (en caso de que el producto no esté disponible, entregar un tipo de producto similar).

La garantía comienza en la fecha de compra probada y es una garantía única que finaliza a partir de esta fecha de inicio. La garantía no se amplía si se sustituye el producto. La garantía no es transferible. Los sacaleches Motif son monousuarios y la garantía sólo se aplica al usuario original del sacaleches.

La garantía cubre los defectos de fabricación. Motif Medical® no puede sustituir una pieza del sacaleches que haya sido dañada por el usuario final durante el uso del sacaleches. La garantía no cubre los artículos perdidos o robados, el desgaste normal de las piezas del sacaleches, ni los artículos que hayan sido mal utilizados, maltratados o almacenados incorrectamente. El incumplimiento de las instrucciones de uso o las modificaciones realizadas en el producto anularán la garantía.

Los productos en garantía se envían por tierra. Los envíos urgentes, de un día para otro y de dos días están disponibles por un cargo adicional. La garantía sólo es válida en Estados Unidos. Los artículos en garantía sólo se enviarán a direcciones en EE. UU.



Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, puede llamar al 844-272- 8390, visitarnos en línea en motifmedical.com o enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente ahello@motifmedical.com



Manufactured for:

Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Teléfono: (844) 272-8390

Correo electrónico

info@motifmedical.com

Web: www.motifmedical.com

Gracias por elegir el Sacaleches Motif Roam™

(844) 272-8390
info@MotifMedical.com
www.motifmedical.com

Motif Medical®
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901